


APLICACIÓN DE AKOPLACAST

Tiempo total de aplicación: **15 minutos**

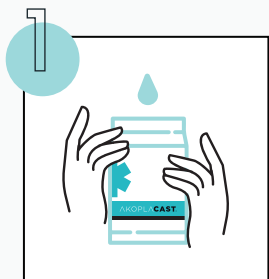

Minuto 0:

Abrir bolsa y llenar con agua para sumergir **AKOPLACAST** por 5 segundos.

La venda se puede exponer al ambiente por 3 minutos antes de sumergirla en agua.

Exponer la venda más de 3 minutos al ambiente **puede afectarla**.


Apretar levemente y sacudir el exceso de agua.

Exceso de fuerza al apretar **puede dañar el tejido**.



Minuto 1 : ACTIVACIÓN DE AKOPLACAST

Comenzará a escucharse **un burbujeo**.

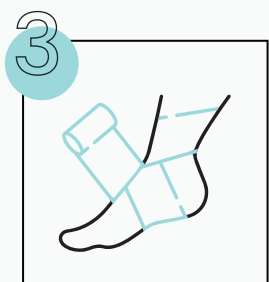

Minuto 1 a 3 : APLICACIÓN AL PACIENTE

Deberá enrollar la venda **formando 3 capas**.

Si aplica 1 o dos capas, no tendrá la rigidez necesaria y tendrá movimiento.

Es recomendable aplicar la venda en un periodo no mayor a 3 minutos.



Minuto 3 al 6 : MOLDEO

Escuchará mayor burbujeo, en este punto se logra un **moldeo perfecto**.

Para lograr un mejor terminado de la punta y evitar deslaminación, **en el minuto**

5 a 6 recomendamos presionar levemente con la mano abierta los primeros 3 cm de la punta de la venda.



Minuto 6 al 15 : ENDURECIMIENTO

La venda dejará de burbujear y **se observará endurecimiento gradual** desde el minuto 6 al 15, **a partir del minuto 6 ya no se logra un moldeo correcto**.

Evitar movimiento en este periodo de tiempo, el movimiento puede causar deslaminación entre capas. **La dureza final** se logra del minuto 10 al 15.